

## ヘビーキャリア™

OKURUMI/おくるみ®

## 新生児搬送具(1人用)

● **お母さんと一緒に安全避難!!**

— ナースの皆さんと共同開発されました。

● **1台1台  
手作りで製作!!**

商品番号 **OKM-001** (商標登録 第5541076号)  
(意匠登録 第1470254号)

**仕様** 商品名: ベビーキャリア・おくるみ®  
(新生児搬送用具: 1人用)  
OKURUMI/おくるみ®  
使用時: 75cm×75cm×厚さ1cm  
収納時: 31cm×22cm×厚さ5cm  
重さ: 約600g  
色: オレンジ(国際セーフティカラー)  
加工: 弱撥水加工  
素材: 外側・ナイロン100%  
内側・綿100% キルティング加工  
※キャリアバック付

● **安全ベルトをロックした完成図です。**

肩からたすき掛けにして搬送して下さい。  
両手が使用できる設計です。

写真: OKM001型



- 特徴**
- ◎ 特殊プラスチックを内蔵し、首の不安定な新生児の安全を考慮した設計です。
  - ◎ 母親の胸部に固定して搬送するので、保温が保て、体温管理ができます。
  - ◎ 内側はおくるみ状で柔らかなキルト材を採用しています。
  - ◎ 布は撥水性があり地面に広げて、おむつ交換ができます。
  - ◎ 収納バックは手のひらサイズでおむつ入れにもなります。
  - ◎ 搬送時は両手が使える安全設計です。
  - ◎ 収納バックはベビーベットの枠部分に吊るしておくことができます。
  - ◎ 肩掛けタイプで(左右どちらでも可)歩行の際の視野も確保できます。
  - ◎ 肩掛けベルトは調整可能、肩パットを採用し、肩に負担が少ない設計です。
- ※保守メンテナンス付きです。

### 無料貸出しいたします

ベビーキャリア(おくるみ・トリプル) お貸し出しいたします。

エアーストレッチャーシリーズ・キング、ラップ、クイック、プロの無料貸出しを行っています。  
詳細はホームページ [www.airstretcher.jp](http://www.airstretcher.jp) から商品の無料貸出しをクリックし、お申し込み下さい。

貴院出入りの医療器会社様へご一報下さい。

●安全で正確にご使用いただくために、予行練習を行ってください。



## 取扱いは簡単

① →



キャリアバックから取り出し、平らな場所で広げます。

② →



赤ちゃんを乗せて下さい。

③ →



必ず足元から「おくるみ」を包んで下さい。

④ →



赤ちゃんに向かって左側の「おくるみ」を右側へ包んで下さい。

⑤ 完成



赤ちゃんに向かって右側の「おくるみ」を左側へ包み、固定ベルクロで止めて下さい。

## 高知日赤共同開発!!



写真提供: 松阪市民病院

搬送例



キャリアバック(病院名・ロゴ印刷は、別途料金が必要です)



ベビーベットにワンタッチでぶら下げられます。



写真: 高知赤十字病院スタッフ  
製品開発・改良風景